

見回りの負担を軽減
暮らしをやさしく見守る
シートセンサーです



ふむくる。
みまもりシートセンサー

ふむくるとは…

シートを踏むと離れた場所の携帯型受信器へ無線でお知らせが届く福祉用具です。

徘徊検知／転倒予測／立ち入り禁止検知／トイレ前検知など、様々なご利用方法があります。




介護の現場を支える3つの特長。

ふむくるのこんなところが喜ばれています。

1.

薄さ2mm


シートの薄さは2mmで、
つまり心配がありません。

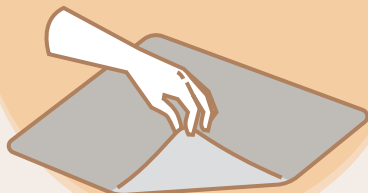

2.

工事不要

コードレスなので設置場所を選びません。
工事不要で、設置は置くだけ！

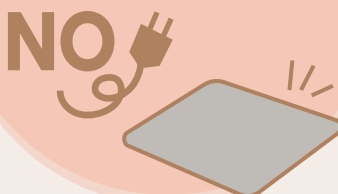

3.

耐久性・防水

900kgの耐久性を備えています。
完全防水で汚れても丸々洗えます。



ご利用者の声



足腰が弱く転倒リスクの高い入居者さんの立ち上がり介助、トイレ介助に役立っています。
シートが踏まれたら必ず入居者さんのところへ行くようにしているので、**定期巡回の回数が減り、職員の負担が以前より軽くなりました。**

携帯受信器は、**光と音だけでなく、振動でもお知らせしてくれるところが良いですね。**
簡単な設定で、音なしで光と振動のみなどパターンを変えられるので、**夜間の静かにしないといけない時のケアで大変助かっています。**



私たちの施設では入居者さんのプライバシーを大事にしているので、カメラなどは使いたくない
と思っていました。ふむくるはシートを踏んだ時だけの通知なので、**プライバシーを尊重しつつ
入居者をやさしく見守ることができる**と思い、導入を決めました。

ふむくるは介護施設のこんな場面で使われています。

01 ベッド前

⊗ 入居者の立ち上がり補助をスムーズにしたい

入居者がベッドから立ち上がろうとしているのが分かるので、スタッフはすぐに入居者の立ち上がり補助に駆けつけることができます。



02 出入口

⊗ 入居者が施設から出て行こうとする


入居者が施設の出入口付近を徘徊していることが分かるので、スタッフはすぐに入居者のもとに駆けつけることができます。



03 トイレ前

⊗ 入居者のトイレ補助をスムーズにしたい


入居者がトイレに行こうとしていることが分かるので、スタッフはすぐに入居者のお手洗いのサポートに駆けつけることができます。

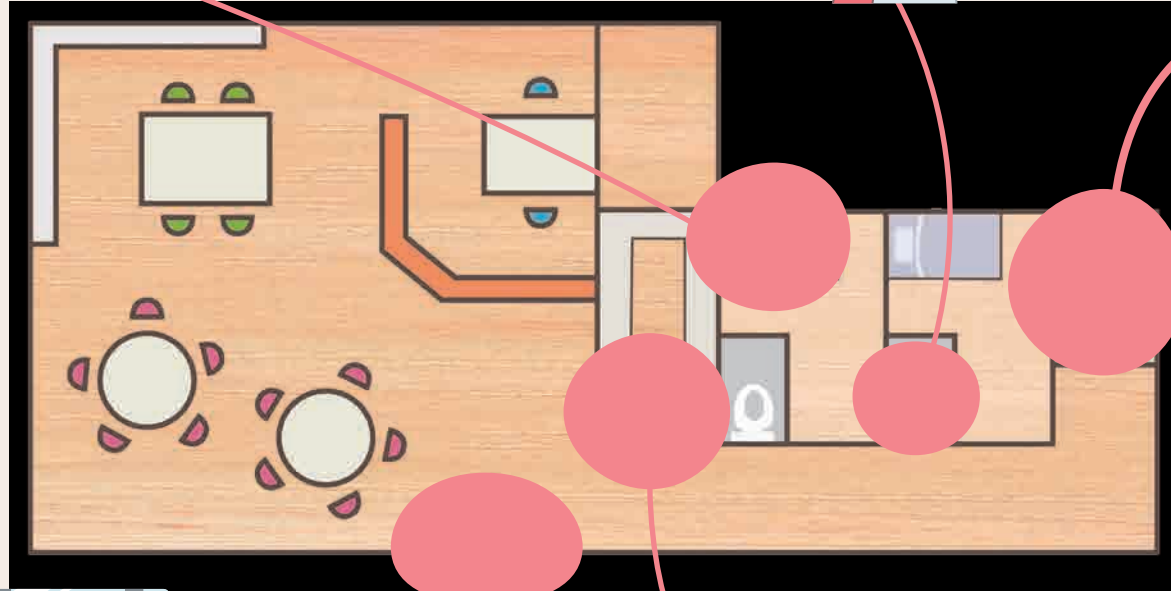

04 階段付近

⊗ 入居者が階段で怪我をしないか心配

入居者が施設の階段付近を徘徊していることが分かるので、スタッフはすぐに入居者のもとに駆けつけることができます。

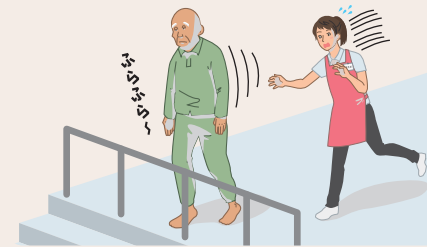

05 立入禁止場所

⊗ 入居者が立入禁止場所に入ってしまう

入居者が立ち入り禁止場所付近を徘徊していることが分かるので、スタッフはすぐに入居者のもとに駆けつけることができます。



😊 ココが使える POINT!

携帯型受信器 1 台に最大 8 枚のシートセンサーが登録できます。
シートと受信器の通信距離は 40m です。
シートは防水なのでトイレや洗面所でも安心して使えます。

+ α

オプション機器で
もっと使いやすく!

電波の届く範囲を拡大
中継BOX



接続BOX
既存ナースコールと連動



外部のPC・スマホで
通知受け取り可能
クラウドBOX



ミニコール
コードレスのミニナースコール



よくある質問

Q シートを消毒したいのですが？

A アルコール噴霧、または塩素系漂白剤を薄めたもので洗って頂いても大丈夫です。

Q 介護施設で使う際、一部費用を個人負担することはできますか？

A 可能です。個人のお客様に口座を登録して頂いての引き落としとなります。

Q 製品を実際に見てみたいのですが？

A 無料のデモ機貸出しサービスを行っております。詳しくは、下記の電話番号またはメール、HPからお問い合わせください。ご希望に応じて、営業担当者がデモに伺わせて頂きます。

■主な仕様	ふむくる	ふむくる L	携帯受信器
■外形寸法	415mm×350mm	866mm×602mm	129mm×44mm×15mm
■重量	約290g	約950g	約93g
■送信機最大接続台数	—	—	8台
■周波数と有効距離	426MHz 屋内(木壁) 約 40m	426MHz 屋内(木壁) 約 40m	—
■電源	内蔵式電池(約2年)	内蔵式電池(約2年)	充電式 (連続稼働時間 24 時間以上)
■保護構造	IP67	IP67	IP44
■TAISコード	01534-000002	01534-000004	—



お問合せ窓口

082-209-2223 (にゃん田介護事業部まで)

受付時間9:00~17:00(土日祝除く)

fax 082-831-2588

mail info-hp@t-denso.com

hp <http://kaigo.t-denso.com/items/urouro>

＼詳細・お問合せはコチラ／



にゃん田介護

731-0103 広島県広島市安佐南区緑井4丁目22番25号 東洋電装株式会社 にゃん田介護事業部